

TURBUHALER®

Uczyn życie łatwiejsze z wygodnym inhalatorem

Jak stosować inhalator Turbuhaler®?


W celu wykonania prawidłowej inhalacji wykonaj poniższe kroki:

1. ODKRĘĆ



Odkręć i zdejmij pokrywę inhalatora. Inhalator należy trzymać **w pozycji pionowej**, czerwonym pokrętkiem do dołu.

2. KLIKNIJ

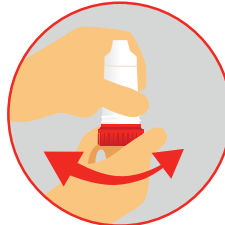


Aby załadować dawkę leku:

2.1 Przekręć czerwone pokrętło do oporu w jednym kierunku, a następnie do oporu w przeciwnym kierunku

(kierunek, od którego rozpoczynasz przekręcenie pokrętła nie ma znaczenia).
2.2 Charakterystyczny dźwięk "KLIK" jest potwierdzeniem prawidłowego załadowania dawki.

3. WYKONAJ WYDECH

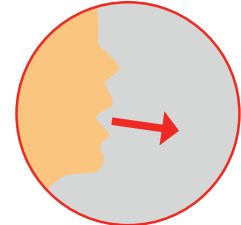

Wykonaj łagodny, niewymagający wysiłku wydech poza inhalator.

4. ZAINHALUJ



INHALACJA:

4.1 Umieść ustnik inhalatora między zębami.

4.2 Obejmij ustnik i wykonaj maksymalnie głęboki i natężony wdech.


4.3 Wymij inhalator z ust i wykonaj wydech **poza** inhalator.

5. ZAKRĘĆ INHALATOR



Pamiętaj, aby zakręcić inhalator po przyjęciu dawki.

6. WYPŁUCZ USTA

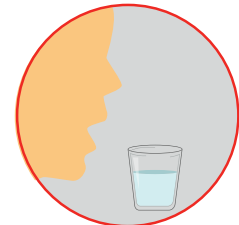

Wypłucz usta wodą zawsze po przyjęciu dawki.

W przypadku inhalatora Turbuhaler® nie ma potrzeby wstrzymania oddechu po inhalacji

Nie trzeba wstrząsać inhalatora Turbuhaler® przed użyciem.

W przypadku inhalatora Turbuhaler® nie ma potrzeby wstrzymania oddechu po inhalacji.

Teraz możesz szybko i łatwo sprawdzić jak używać inhalatora Turbuhaler®

Każdy chory na astmę ma możliwość obejrzenia filmu instruktażowego po zeskanowaniu QR kodu z opakowania



www.turbuhaler.pl

Korzystanie z QR kodów jest prostsze, niż myślisz:

1. Ściągnij na swój telefon bezpłatną aplikację do skanowania QR kodów z Google Play lub App Store (wpisując w wyszukiwarce „kod QR”)
2. Uruchom aplikację i zeskanuj kod z opakowania
3. Obejrzyj film. Film jest również dostępny na stronie: www.turbuhaler.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w ulotce dla pacjenta. Zapytaj swojego Lekarza lub Farmaceutę jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące inhalatora Turbuhaler®.

